

## Anwendungsgebiete

### Innere Medizin

Alternative bei Patienten mit Resorptions- und Absorptionsstörungen, bei denen die orale Gabe nicht effizient erscheint

### Kinderheilkunde

Bei Spritzenangst, Umgehung alkoholischer Tropfen oder voluminöser Tabletten/Dragees, kontaktfreie Behandlung der Windeldermatitis

### Geriatric

Eine Alternative bei Patienten mit schlechten Venenverhältnissen und/oder Gerinnungsstörungen

### Pflege

Bei Mundtrockenheit, zur Dekubitus-Pflege

### Unfallmedizin

Sprüheinsatz bei Verbrennungen, Verbandswechsel und Wundreinigungen

### Zahnmedizin

Zur Begleittherapie z. B. bei empfindlichen Zahnhälsen und Parodontopathien

### Veterinärmedizin

Als Alternative zur Injektion

### Neuraltherapie

Vereinfachte laryngeale Neuraltherapie

## Anwendungshinweise

Ein Sprühstoß mit dem Adapplikator entspricht einem definierten Sprühvolumen von 0,09 ml pro Hub (ca. 3 Tropfen). Zwischen den einzelnen Hüben sollte ein zeitlicher Abstand eingehalten werden. Die Applikation mit dem Adapplikator erfolgt sublingual, buccal oder laryngeal. Der Adapplikator ist für vitOrgan-Ampullen in der Größe von 2 ml lieferbar.

Dieses Produkt können Sie in allen deutschen Apotheken, oder direkt bei vitOrgan unter [bestellungen@vitOrgan.de](mailto:bestellungen@vitOrgan.de) beziehen:

vitOrgan - Adapplikator 2ml EAN: 4260084038085

Überreicht durch:

**vitOrgan Arzneimittel GmbH**  
Brunnwiesenstraße 21  
73760 Ostildern/Stuttgart  
Telefon (0711) 4 48 12-0  
Telefax (0711) 4 48 12-41  
[info@vitOrgan.de](mailto:info@vitOrgan.de)



## Adapplikator



## Idee

Die Berücksichtigung individueller Patientenbedürfnisse ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Heilungserfolg und die Basis für eine nachhaltige Patientenbindung. Hier setzt die nicht-invasive, nadelfreie Wirkstoffapplikation mit dem Adapplikator an.

## Anwendung

Mit dem vitOrgan Adapplikator (Ampoule Direct Applicator) wird erstmals die sublinguale, buccale und topische Applikation von Injektionslösungen „nadelfrei“ möglich.

Aus jeder Ampulle lässt sich hierzu ein Mund-, Haut-, Wund- und Nasenspray herstellen. Hierzu wird der Ampulleninhalt mit dem Adapplikator microfein zerstäubt und hocheffektiv auf die Schleimhaut oder Haut aufgebracht.

Auf diese Weise lassen sich optimale Resorptionsbedingungen erzielen.



## Vorteile

- Nicht-invasive Alternative zur Applikation von Injektionslösungen
- Kontaktfreie Anwendung
- Absorption durch reich durchblutete Schleimhaut
- Wirkstoffe werden der enzymatischen Verdauung entzogen
- Rascher Wirkungseintritt
- Unabhängigkeit von Interaktionen (z. B. Magenentleerung, Nahrung) im Verdauungstrakt
- Applikation auch möglich bei Erbrechen, Schluckbeschwerden und pathologischen Veränderungen des Dünndarms (z. B. Malabsorption, Maldigestion)
- Als Alternative zur oralen Medikation bei Patienten mit Spritzenangst, schlechten Venenverhältnissen, unruhigen Patienten (Pädiatrie, Geriatrie, Psychiatrie), sowie Unverträglichkeit auf Tabletten-Trägerstoffe
- Der Firstpass-Effekt in der Leber wird vermieden (metabolischer Abbau)
- Ampullenware ist hypoallergen, in der Regel alkoholfrei und frei von Konservierungsstoffen
- Ideal für Ihre Reiseapotheke

## 1. Schritt

Entnehmen Sie den Adapplikator aus der Verpackung und eine vitOrgan-Ampulle aus der Faltschachtel.



## 2. Schritt

Entfernen Sie die Schutzkappe.



## 3. Schritt

Brechen Sie die Ampulle auf und führen Sie diese von unten in den Adapplikator ein, bis diese fest sitzt.



## 4. Schritt

Das Versprühen der Flüssigkeit erfolgt durch Drücken der Pumpeinrichtung mit Daumen oder Zeigefinger.

